


日常のお手入れについて

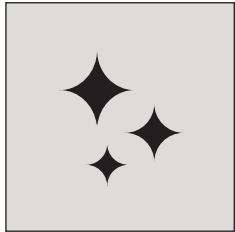

日常のお手入れ

■汚れを落とす場合

下記①～③の手順で行ってください。

- ①水で薄めた中性洗剤にひたした布をよくしぼって拭いてください。
- ②水でひたした布をよくしぼって、残った洗剤分を拭き取ってください。
- ③乾いた布で残った水分を拭き取ってください。



お手入れの注意

- 揮発性のもの(シンナー・ベンジン・ガソリンなど)やクレゾールは使用しないでください。変色・変質のおそれがあります。
- 消毒剤を使用する場合は、指定以外の薬品を使用しないでください。破損・変質のおそれがあります。
- 中性洗剤を使用した場合は、その後水拭きをしてください。水拭きをしないと樹脂の部分が割れるおそれがあります。
- オゾン殺菌器、オートクレーブ殺菌器などには対応できません。

■消毒する場合

※必ず下記の消毒剤を指定の濃度で、消毒剤の取扱説明書などの指示に従ってご使用ください。

76.9～81.4%	消毒用エタノール
0.05～0.2%	塩化ベンザルコニウム(オスバンなど)
0.05～0.2%	塩化ベンゼトニウム(ハイアミンなど)
0.05%	グルコン酸クロルヘキシジン(ヒビテンなど)
0.02～0.05%	次亜塩素酸ナトリウム(ミルトンなど)

アフターサービスについて



1.アフターサービスについて

修理のご依頼は、お買い上げの販売店までご連絡ください。

■連絡していただきたい内容

- ・品名、品番、製品識別表示ラベルの番号(天板裏側に貼付:表紙「各部の名称」参照)
- ・お買い上げ日
- ・破損または異常の内容(できるだけ詳しく)
- ・施設名、お名前、ご住所および電話番号

2.保証期間内の場合

保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします。ただし、保証期間内でも修理が有償になる場合があります。詳しくは保証書をご覧ください。

3.保証期間が過ぎている場合

修理により使用できる製品については、ご希望により有償で修理いたします。

4.製品の最低保有年数は

弊社では、この製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間を製造打ち切り後3年としております。

取扱説明書

STR-900-NA/STR-900-BR ベッドサイドテーブル

保証書付

まえがき

このたびは、ベッドサイドテーブル(以下、テーブル)をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。


この「取扱説明書」には、テーブルを安全にお使いいただくための注意事項と使用方法などを記載しています。

- テーブルをお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- テーブルを使用する方ばかりでなく、付き添いの方や介護する方もこの「取扱説明書」をよくお読みください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- お買い上げの製品は、改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
- ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

使用目的

■このテーブルは、ベッド上で食事や軽作業をする際に使用することを目的に作られています。

各部名称

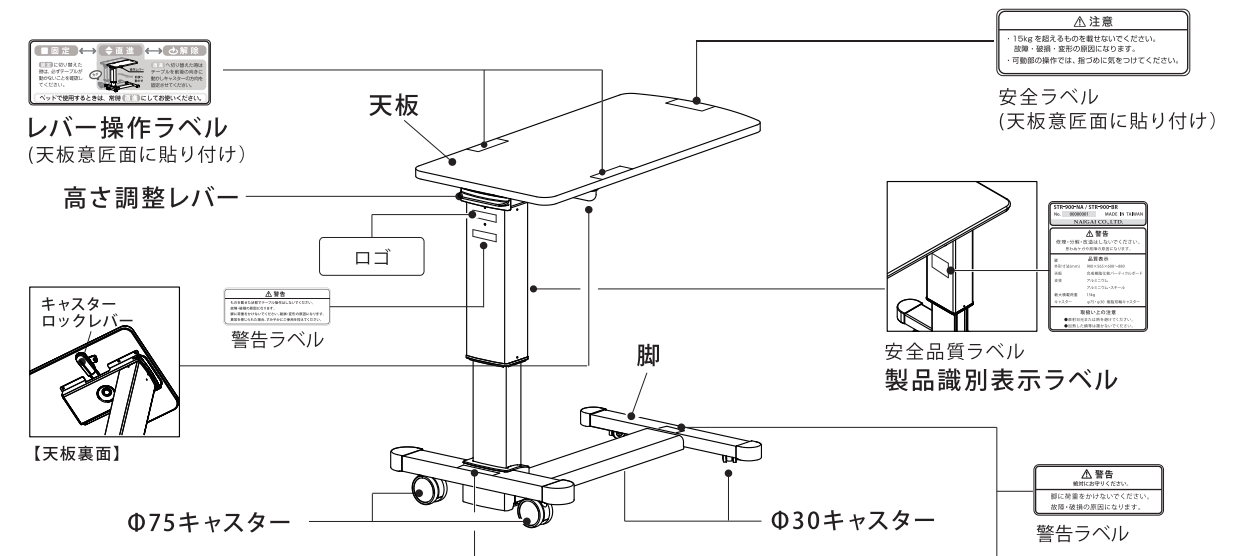

安全ラベルについて

- ものを載せた状態でテーブル操作はしないでください。
- 15kgを超えるものを載せないでください。
- 脚に荷重をかけないでください。
- 可動部の指づめに気を付けてください。
- 直射日光または熱を避けてください。
- 加熱した鍋等は置かないでください。
- 異常が感じられたらすみやかにご使用をひかえてください。

注意事項の中で、特に注意していただきたい項目をラベルにして貼ってあります。
天板面・天板裏・支柱・脚のラベルは、はがしたり傷つけたりしないでください。
安全ラベルの内容をお守りにならなかった場合、思わぬケガや故障・破損・変形の原因になります。

安全にご利用いただくための注意事項



けい
警
こく
告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷(骨折・圧迫・麻痺など)を負う可能性が想定される内容を示しています。

●テーブル以外の用途に使用しないでください。

●ベッドの調整などを行う場合はテーブルをベッドからはなしてください。

●ベッドに設置する際は、電源コードなどをはさまないようにしてください。

●滑りやすいゆかでは使用しないでください。

●物を載せた状態でテーブルの移動や高さ調整はしないでください。

●テーブルの上に乗ったり、寄り掛からないでください。

●お客様による修理・改造はしないでください。

●熱器具の近くや直射日光のあたる場所では使用しないでください。

●ガสปリングの取扱いには注意してください。



ちゅう
注
い
意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷(打撲・すり傷・切り傷など)を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

●テーブルをベッドに設置するときは指定された範囲内で使用してください。

●段差のある場所での移動は避けてください。

●傷つきやすいゆかでは使用しないでください。

●15kgを超えるものを載せないでください。

●天板の上に、加熱したなべ・湯わかしを直接載せないでください。


●天板に水分をこぼしたり、水分を含んだものを放置しないでください。

●天板に粘着力の強いテープなどを貼り付けないようにしてください。

●スプレータイプの殺虫剤をテーブルに直接噴射しないでください。

- 2 -

高さ調節のしかた

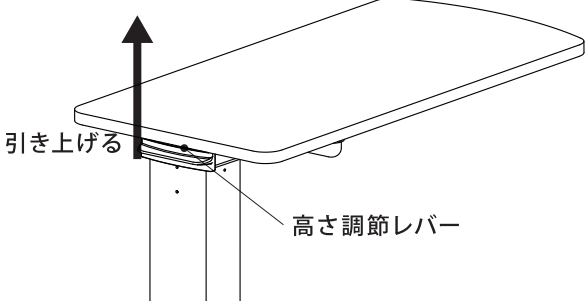


引き上げる

高さ調節レバー

- 高さ調節レバーを引きあげながら、お好みの高さに調節してください。高さ調節レバーを離すとその位置で固定されます。
- 高さ調節レバーを引きあげていない場合でも、天板を下から押すとテーブルの高さがあがります。これは安全機構によるもので故障ではありません。

レバー操作のしかた

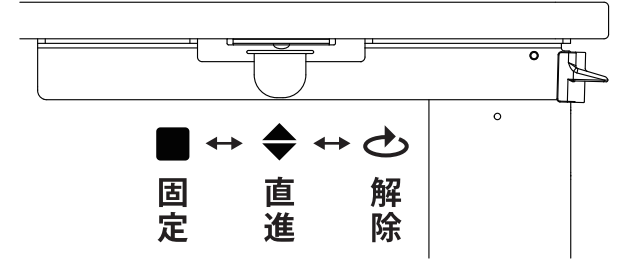

固定 直進 解除


- 3タイプの切り替えにより、用途に合わせた使い方ができます。
- レバーは両側から操作できます。

お願いと操作方法

固定する時には必ずテーブルが固定されていることを確認してください。


手元のレバーを直進の位置にしてからテーブルを前後の向きに動かして方向を固定させると操作が安定します。

固定

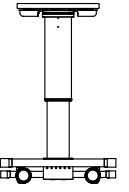


キャスターをロックして
テーブルを固定します。

直進

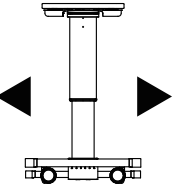

矢印方向(直進方向)にだけ
動かすことが出来ます。

解除

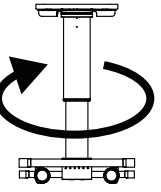

自由にテーブルを動かせます。

仕様

品 名	ベッドサイドテーブル	
品 番	STR-900-NA/STR-900-BR	
色	ナチュラル・ブラウン	
本体寸法(cm)	W900×D560×H610 ～ 880 (天板 900×450)	
製品重量(kg)	約20kg	
材 質	天 板	合成樹脂化粧 MDF
	支 柱	アルミニウム製
	脚	アルミニウム製、ポリプロピレン
最大積載重量	15kg	
キャスター	Φ30・Φ75mm樹脂製双輪キャスター	

- 3 -